


## **ROUGE SIRIUS PICRE'**

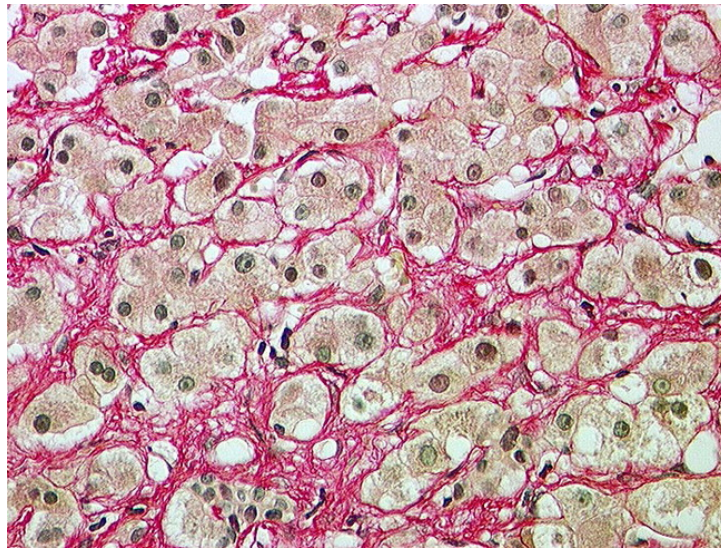

*Foi*

CODE	DESCRIPTION	NOMBRE DE TESTS
04-121873	Rosso Sirio picrato	100 test



Dispositif medical de diagnostic en vitro



Fabricant: Bio-Optica Milano S.p.A.

Date d'émission: 30/03/2020

Rev. 02

Préparé pour la coloration d'échantillons cyto-histologiques à examiner en microscopie optique.

Méthode indiquée pour mettre en évidence les fibres de collagène et les pigments biliaires sur des sections de tissu fixées dans du formol et incorporées dans de la paraffine.

### PRINCIPE

La solution colorante (Sirio picrato red) a une double fonction:

- met en évidence le collagène par un lien entre le rouge Sirio et les groupes fonctionnels de base des protéines tissulaires.
- met en évidence les pigments biliaires par conjugaison avec l'acide picrique.

### MÉTHODE

- 1) Amener la coupe à l'eau distillée.
- 2) Poser sur la section 10 gouttes du réactif A: laisser agir 50 minutes.
- 3) Laver rapidement en eau distillée.
- 4) Poser sur la section 10 gouttes du réactif B: laisser agir 2 minutes. Répéter 2 fois.
- 5) Laver rapidement en eau distillée et égoutter la lame.
- 6) Poser sur la section 10 gouttes du réactif B: laisser agir 3 minutes.
- 7) Virer en eau de robinet pendant 3 minutes.
- 8) Laver à l'eau distillée et déshydrater rapidement à travers la série d'alcool ascendante, en laissant 1 minute dans le dernier absolu: xylène et baume.



Image fournie à titre illustratif

Date d'émission: 30/03/2020

Rev. 02

### Détails techniques

Spécifications	Temps de réalisation	60 minutes		
	Équipement complémentaire	Aucun		
	Résultats	Bilirubine	Vert	
		Collagène	Rouge	
		Noyaux	Bleu	
Erythrocytes		Rouge		
Réactifs	A) Rouge sirius picré solution	30 ml		
	B) Tampon de différenciation	2 x 30 ml		
	C) Hématoxyline de Mayer	30 ml		
Conservation	Conservation	Conserver la préparation à 15-25°C. Les récipients doivent être toujours bien fermés.		
	Température de stockage	15-25°C		
	Stabilité	Une fois ouvert, le réactif est valable jusqu'à la date de péremption indiquée, pourvu qu'il ait été conservé correctement.		
	Validité	2 années		
Attention	Avertissements et précautions	Le produit doit être utilisé par du personnel technique spécialisé. Le produit est classé comme dangereux. Lire attentivement les informations figurant sur l'étiquette (symboles de danger, phrases de risque et de sécurité), et consulter toujours la fiche de sécurité contenant les informations relatives aux risques présentés par la préparation, les mesures de précaution à adopter pendant l'utilisation et les premiers soins, ainsi que les mesures en cas de dispersion accidentelle. Ne pas utiliser si le conditionnement primaire a été endommagé.		
	Élimination	Déchet dangereux ; confier à des entreprises spécialisées et agréées, selon les lois en vigueur.		

Date d'émission: 30/03/2020

Rev. 02